

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE

Část I: Produktové informace	2
Část II: Specifikace produktu	2
Část III: Položky.....	3
Část IV: Prohlášení o shodě	5
Část V: Náhled produktu	5
Část VI: Původ produktu.....	6
Část VII: Bezpečnostní informace.....	6
Část VIII: Identifikační údaje	6
Část IX: Postup pro navlékání a snímání rukavic	7
Část X: Schvalovací doložka	8

Část I: Produktové informace

Název produktu:	Nitrilové rukavice NITRIL IDEAL, 100 ks, nepudrované, 3.5 g
Obchodní název:	NITRIL IDEAL
Typ:	Vyšetřovací & ochranné nitrilové rukavice
Materiál:	Nitril
Barva:	Žlutá, tmavě růžová, magenta, zelená, modrá, tmavě modrá, černá
Provedení:	Pravolevé, zdrsňené konečky prstů, korálková manžeta
Úprava:	Bez pudru, chlorované, nesterilní, bez přírodního kaučuku
Skladování:	Rukavice neztrácejí své vlastnosti při skladování v suchu při teplotě od 5 do 40 °C
Životnost:	5 let od data výroby při dodržení podmínek skladování
Balení:	100 ks v krabičce, 1 000 ks v kartonu

Část II: Specifikace produktu

Délka (mm):	Min. 240, typická hodnota 245
Šířka (mm):	XS 76 ± 4 S 86 ± 4 M 98 ± 4 L 107 ± 4 XL 115 ± 4 XXL 124 ± 4
Tloušťka (mm):	Prsty: 0.10 ± 0.03, typická hodnota 0.09 Dlaň: 0.09 ± 0.03, typická hodnota 0.08
Prodloužení do přetržení (%):	Min. 500, typická hodnota 543
Pevnost v tahu (MPa):	Min. 18, typická hodnota 33.7
Střední síla při přetržení (N):	Min. 6, typická hodnota 6.5
AQL:	1.5

Část III: Položky

Pol. č.	Barva	Vel.	Kvalita (g)	Balení	Rozměry (mm)	Hmotnost (g)	EAN
100060	Žlutá	XS	2.9 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	330	8594177200575
				Karton	315 × 230 × 210	3 700	8594177203835
100061	Žlutá	S	3.2 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	360	8594177200582
				Karton	315 × 230 × 210	4 000	8594177203842
100062	Žlutá	M	3.5 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	390	8594177200599
				Karton	315 × 230 × 210	4 300	8594177203859
100063	Žlutá	L	3.8 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	420	8594177200858
				Karton	315 × 230 × 210	4 600	8594177203866
100087	Tmavě růžová	XS	2.9 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	330	8594177200841
				Karton	315 × 230 × 210	3 700	8594177204078
100080	Tmavě růžová	S	3.2 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	360	8594177200773
				Karton	315 × 230 × 210	4 000	8594177204085
100081	Tmavě růžová	M	3.5 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	390	8594177200780
				Karton	315 × 230 × 210	4 300	8594177204092
100082	Tmavě růžová	L	3.8 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	420	8594177200797
				Karton	315 × 230 × 210	4 600	8594177204108
100080	Magenta	XS	2.9 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	330	8594177201923
				Karton	315 × 230 × 210	3 700	8594177205235
100081	Magenta	S	3.2 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	360	8594177201930
				Karton	315 × 230 × 210	4 000	8594177205242
100082	Magenta	M	3.5 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	390	8594177201947
				Karton	315 × 230 × 210	4 300	8594177205259
100152	Zelená	XS	2.9 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	330	8594177201497
				Karton	315 × 230 × 210	3 700	8594177204801
100153	Zelená	S	3.2 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	360	8594177201503
				Karton	315 × 230 × 210	4 000	8594177204818
100154	Zelená	M	3.5 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	390	8594177201510
				Karton	315 × 230 × 210	4 300	8594177204825
100155	Zelená	L	3.8 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	420	8594177201527
				Karton	315 × 230 × 210	4 600	8594177204832
100156	Zelená	XL	4.1 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	450	8594177201534
				Karton	315 × 230 × 210	4 900	8594177204849

Pol. č.	Barva	Vel.	Kvalita (g)	Balení	Rozměry (mm)	Hmotnost (g)	EAN
100179	Modrá	S	3.2 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	360	8594177201763
				Karton	315 × 230 × 210	4 000	8594177205075
100180	Modrá	M	3.5 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	390	8594177201770
				Karton	315 × 230 × 210	4 300	8594177205082
100181	Modrá	L	3.8 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	420	8594177201787
				Karton	315 × 230 × 210	4 600	8594177205099
100182	Modrá	XL	4.1 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	450	8594177201794
				Karton	315 × 230 × 210	4 900	8594177205105
100134	Tmavě modrá	S	3.2 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	360	8594177201312
				Karton	315 × 230 × 210	4 000	8594177204627
100135	Tmavě modrá	M	3.5 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	390	8594177201329
				Karton	315 × 230 × 210	4 300	8594177204634
100136	Tmavě modrá	L	3.8 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	420	8594177201336
				Karton	315 × 230 × 210	4 600	8594177204641
100137	Tmavě modrá	XL	4.1 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	450	8594177201343
				Karton	315 × 230 × 210	4 900	8594177204658
100177	Černá	XS	2.9 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	330	8594177201749
				Karton	315 × 230 × 210	3 700	8594177205051
100183	Černá	S	3.2 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	360	8594177201800
				Karton	315 × 230 × 210	4 000	8594177205112
100184	Černá	M	3.5 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	390	8594177201817
				Karton	315 × 230 × 210	4 300	8594177205129
100185	Černá	L	3.8 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	420	8594177201824
				Karton	315 × 230 × 210	4 600	8594177205136
100186	Černá	XL	4.1 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	450	8594177201831
				Karton	315 × 230 × 210	4 900	8594177205143

Část IV: Prohlášení o shodě

Tímto potvrzujeme, že výše uvedený výrobek je v souladu s:

Zdravotnický prostředek: Basic UDI-DI	EU MDR 2017/ 745, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 859417720NITRILUS
PPE (OOP):	EU PPE 2016/425 Cat. III, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421
Chemická propustnost:	EN 16523-1
Styk s potravinami:	EU 1935/2004, EU 10/2011, EU 2023/2006, EN 1186, EN 13130

Část V: Náhled produktu



Část VI: Původ produktu

Výrobce / Distributor:

Espeon s.r.o., U větrolamu 1212/53, 184 00 Praha 8, info@espeon.cz , www.espeon.cz

Část VII: Bezpečnostní informace

- Rukavice nejsou vhodné pro kontakt s velmi horkými předměty
- Při používání rukavic zvyšte opatrnost při manipulaci s ostrými předměty
- Před použitím zkontrolujte rukavice, zda nejsou poškozené
- Rukavice navlékejte na suché ruce
- v případě alergických reakcí se poraďte s lékařem
- Po použití rukavic proveďte hygienu rukou s použitím alkoholového dezinfekčního přípravku nebo si je umyjte mýdlem a vodou

Část VIII: Identifikační údaje

Datum výroby, datum expirace, číslo výrobní dávky, EAN kód pro identifikaci výrobku a UDI kód pro identifikaci zdravotnického prostředku je uveden na krabici a kartonu rukavic.

Část IX: Postup pro navlékání a snímání rukavic

Obecné doporučení před úkonem vykonávaném v jednorázových rukavicích je hygiena a mytí rukou. Správná hygiena zvýší již zmiňovanou bezpečnost.

Postup pro navlékání rukavic



Ihned po provedení dezinfekce nebo umytí rukou, vyjměte z originálního balení rukavici.



Nejvhodnější pro dotyk je část odpovídající zápěstí ruky neboli horního okraje manžety.



S pomocí druhé ruky si opatrně natáhněte první z jednorázových rukavic.



Holou rukou vyjměte druhou rukavici a dotýkejte se jen části u zápěstí.



Při nasazování druhé rukavice se vyhněte kontaktu s předloktím – rukavici natáhněte přes ohnuté prsty ruky, která už je v rukavici.



Rukavice jsou nasazeny. Nedotýkejte se ničeho mimo určené použití, aby zůstala zachována hygiena.

Postup pro snímání rukavic



Po skončení úkonu, ke kterému byly vyžadovány jednorázové rukavice, přejdeme k opatrnému snímání rukavic.



Uchopte rukavici u zápěstí bez dotyku kůže a stáhněte ji tak, aby se obrátila naruby.



Odstraněnou rukavici vždy držte v ruce s rukavicí. Pro sundání druhé rukavice použijte prsty holé ruky, které vsunete mezi rukavici a zápěstí.



Shrnutím odstraňte rukavici z ruky a obalte jí první shrnutou rukavici.



Ihned obě odstraněné rukavice vyhodte.



Po sejmutí rukavic si ruce vydezinfikujte nebo umyjte mýdlem a vodou.

Část X: Schvalovací doložka

Název dokumentu: PD-70009-IDEAL, Rev: 0 (05-2026)

Společnost: Espeon, s.r.o., U větrolamu 1212/53, 184 00 Praha 8, Česká republika

Jméno: Ing. Martin Kameš

Pozice: Jednatel
