

## PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE

Část I: Produktové informace .....	2
Část II: Specifikace produktu .....	2
Část III: Položky.....	3
Část IV: Prohlášení o shodě .....	4
Část V: Náhled produktu .....	4
Část VI: Původ produktu.....	5
Část VII: Bezpečnostní informace.....	5
Část VIII: Identifikační údaje .....	5
Část IX: Postup pro navlékání a snímání rukavic .....	6
Část X: Schvalovací doložka .....	7

## Část I: Produktové informace

Název produktu:	Nitrilové rukavice NITRIL SPARKLE 100 ks, nepudrované, 4.0 g
Obchodní název:	NITRIL SPARKLE
Typ:	Jednorázové nesterilní ochranné a vyšetřovací rukavice
Materiál:	100% syntetický nitril
Barva:	Perleťově růžová, perleťově fialová, perleťově zlatá, perleťově stříbrná
Provedení:	Pravolevé, zdrsňené konečky prstů, korálková manžeta
Úprava:	Bez pudru
Skladování:	Rukavice neztrácejí své vlastnosti při skladování v suchu při teplotě od 5 do 40 °C
Životnost:	5 let od data výroby při dodržení podmínek skladování
Balení:	100 ks v krabičce, 10 krabiček v kartonu

## Část II: Specifikace produktu

Délka (mm):	Min. 240, typická hodnota 245
Šířka (mm):	XS 76 ± 4 S 86 ± 4 M 98 ± 4 L 107 ± 4 XL 115 ± 4 XXL 124 ± 4
Tloušťka (mm):	Prsty: 0.11 ± 0.02, typická hodnota 0.10 – 0.12 Dlaň: 0.075 ± 0.02, typická hodnota 0.07 – 0.08
Prodloužení do přetržení (%):	Min. 500, typická hodnota 557
Pevnost v tahu (MPa):	Min. 18, typická hodnota 33.7
Střední síla při přetržení (N):	Min. 6, typická hodnota 6.7
AQL:	1.5

### Část III: Položky

Pol. č.	Barva	Vel.	Kvalita (g)	Balení	Rozměry (mm)	Hmotnost (g)	EAN
100145	Perleťově fialová	XS	3.4 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	380	8594177201428
				Karton	315 x 230 x 210	4 200	8594177204733
100146	Perleťově fialová	S	3.7 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	410	8594177201435
				Karton	315 x 230 x 210	4 500	8594177204740
100147	Perleťově fialová	M	4.0 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	440	8594177201442
				Karton	315 x 230 x 210	4 800	8594177204757
100071	Perleťově fialová	L	4.3 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	470	8594177203958
				Karton	315 x 230 x 210	5 100	8594177203965
100142	Perleťově růžová	XS	3.4 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	380	8594177201398
				Karton	315 x 230 x 210	4 200	8594177204702
100143	Perleťově růžová	S	3.7 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	410	8594177201404
				Karton	315 x 230 x 210	4 500	8594177204719
100144	Perleťově růžová	M	4.0 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	440	8594177201411
				Karton	315 x 230 x 210	4 800	8594177204726
100024	Perleťově růžová	L	4.3 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	470	8594177203972
				Karton	315 x 230 x 210	5 100	8594177203989
100172	Perleťově stříbrné	XS	3.4 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	380	8594177201695
				Karton	315 x 230 x 210	4 200	8594177205006
100173	Perleťově stříbrné	S	3.7 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	410	8594177201701
				Karton	315 x 230 x 210	4 500	8594177205013
100174	Perleťově stříbrné	M	4.0 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	440	8594177201718
				Karton	315 x 230 x 210	4 800	8594177205020
100175	Perleťově stříbrné	L	4.3 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	470	8594177201725
				Karton	315 x 230 x 210	5 100	8594177205037
100176	Perleťově stříbrné	XL	4.6 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	500	8594177201732
				Karton	315 x 230 x 210	5 400	8594177205044
100148	Perleťově zlatá	XS	3.4 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	380	8594177201459
				Karton	315 x 230 x 210	4 200	8594177204764
100149	Perleťově zlatá	S	3.7 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	410	8594177201466
				Karton	315 x 230 x 210	4 500	8594177204771
100150	Perleťově zlatá	M	4.0 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	440	8594177201473
				Karton	315 x 230 x 210	4 800	8594177204788
100151	Perleťově zlatá	L	4.3 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	470	8594177201480
				Karton	315 x 230 x 210	5 100	8594177204795

## Část IV: Prohlášení o shodě

Tímto potvrzujeme, že výše uvedený výrobek je v souladu s:

Zdravotnický prostředek: EU MDR 2017/ 745, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4  
Basic UDI-DI 859417720NITRILUS

PPE (OOP): EU PPE 2016/425 Cat. III, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421

Chemická propustnost: EN 16523-1

Styk s potravinami: EU 1935/2004, EU 10/2011, EU 2023/2006, EN 1186, EN 13130

## Část V: Náhled produktu



## Část VI: Původ produktu

Výrobce / Distributor:

Espeon s.r.o., U větrolamu 1212/53, 184 00 Praha 8, [info@espeon.cz](mailto:info@espeon.cz) , [www.espeon.cz](http://www.espeon.cz)

## Část VII: Bezpečnostní informace

- Rukavice nejsou vhodné pro kontakt s velmi horkými předměty
- Při používání rukavic zvyšte opatrnost při manipulaci s ostrými předměty
- Před použitím zkontrolujte rukavice, zda nejsou poškozené
- Rukavice navlékejte na suché ruce
- v případě alergických reakcí se poraďte s lékařem
- Po použití rukavic proveďte hygienu rukou s použitím alkoholového dezinfekčního přípravku nebo si je umyjte mýdlem a vodou

## Část VIII: Identifikační údaje

Datum výroby, datum expirace, číslo výrobní dávky, EAN kód pro identifikaci výrobku a UDI kód pro identifikaci zdravotnického prostředku je uveden na krabici a kartonu rukavic.

## Část IX: Postup pro navlékání a snímání rukavic

Obecné doporučení před úkonem vykonávaném v jednorázových rukavicích je hygiena a mytí rukou. Správná hygiena zvýší již zmiňovanou bezpečnost.

### Postup pro navlékání rukavic



Ihned po provedení dezinfekce nebo umytí rukou, vyjměte z originálního balení rukavici.



Nejvhodnější pro dotyk je část odpovídající zápěstí ruky neboli horního okraje manžety.



S pomocí druhé ruky si opatrně natáhněte první z jednorázových rukavic.



Holou rukou vyjměte druhou rukavici a dotýkejte se jen části u zápěstí.



Při nasazování druhé rukavice se vyhněte kontaktu s předloktím – rukavici natáhněte přes ohnuté prsty ruky, která už je v rukavici.



Rukavice jsou nasazeny. Nedotýkejte se ničeho mimo určené použití, aby zůstala zachována hygiena.

### Postup pro snímání rukavic



Po skončení úkonu, ke kterému byly vyžadovány jednorázové rukavice, přejdeme k opatrnému snímání rukavic.



Uchopte rukavici u zápěstí bez dotyku kůže a stáhněte ji tak, aby se obrátila naruby.



Odstraněnou rukavici vždy držte v ruce s rukavicí. Pro sundání druhé rukavice použijte prsty holé ruky, které vsunete mezi rukavici a zápěstí.



Shrnutím odstraňte rukavici z ruky a obalte jí první shrnutou rukavici.



Ihned obě odstraněné rukavice vyhodte.



Po sejmutí rukavic si ruce vydezinfikujte nebo umyjte mýdlem a vodou.

## Část X: Schvalovací doložka

Název dokumentu: PD-70021-SPARKLE, Rev: 0 (05-2026)

Společnost: Espeon, s.r.o., U větrolamu 1212/53, 184 00 Praha 8, Česká republika

Jméno: Ing. Martin Kameš

Pozice: Jednatel

---